

Informations sur les mesures à prendre en cas d'alarme

Écran de la thérapie TTFIELDS

Marche

L'icône TTFIELDS est bleue en permanence



Arrêt

L'icône TTFIELDS ne s'allume pas en bleu



AFFICHAGE ET COULEUR DES ALARMES

CAUSES

ARRÊTER L'ALARME

ACTION

COMMENCER LE TRAITEMENT



Batterie presque vide



Appuyer sur la touche TTFIELDS



0 Éteindre l'appareil

Remplacer la batterie



1 Allumer l'appareil

Appuyer sur la touche TTFIELDS



(attendre environ 5 secondes)



Trois fois (courte alarme)












Batterie vide



Appuyer sur la touche TTFIELDS

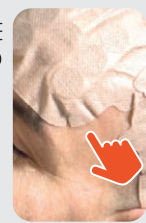

AFFICHAGE ET COULEUR DES ALARMES	CAUSES	ARRÊTER L'ALARME	ACTION	COMMENCER LE TRAITEMENT
 <p>L'icône « Error » clignote une fois par seconde</p> <p>L'icône TTFIELDS clignote</p> <p>Le court signal sonore d'alarme retentit trois fois</p>	Rappel du début du traitement			
 <p>L'icône « Error » clignote toutes les deux secondes</p> <p>L'icône TTFIELDS éteinte</p> <p>Le long signal sonore d'alarme retentit trois fois</p>	Pas de connexion	 <p>Appuyer sur la touche TTFIELDS</p>	 <p>Vérifier si les fiches sont connectées.</p>	 <p>Appuyer sur la touche TTFIELDS</p>
 <p>L'icône « Error » clignote deux fois par seconde</p> <p>L'icône TTFIELDS éteinte</p> <p>Le court signal sonore d'alarme retentit trois fois, puis deux fois</p>	Les électrodes excèdent la température maximale		<p>Fournir des conditions plus fraîches :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aller dans un endroit plus frais. • Laisser refroidir les électrodes de 5 à 10 minutes. • Vérifier le contact entre les électrodes et la peau, et appuyer sur les électrodes et les recouvrir d'un filet si nécessaire. • Remplacer les électrodes si nécessaire. 	
 <p>L'icône « Error » s'éteint toutes les deux secondes</p> <p>L'icône TTFIELDS éteinte</p> <p>Le court signal sonore d'alarme retentit trois fois</p>	Tous les autres indicateurs d'alarme		<p>Veillez vous référer au manuel de l'utilisateur ou contacter le spécialiste de l'assistance de l'appareil Optune.</p> 	

Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur seul, ou si les électrodes sont visiblement défectueuses, veuillez utiliser le câble de connexion de remplacement.



Câble de connexion de remplacement

Consultez le manuel de l'utilisateur pour des renseignements plus détaillés ou contactez le spécialiste de l'assistance de l'appareil Optune.

