

Découvrez si Optune pourrait vous convenir

Comment Optune peut-il s'intégrer à mon plan de traitement si mon médecin me le prescrit?

Si vous avez récemment reçu un diagnostic de GBM, Optune est utilisé avec et après la chimiothérapie*.



Si vous avez un GBM récidivant, Optune est utilisé seul une fois que toutes les options de traitement, comme la chirurgie et la radiothérapie, ont été épuisées.

Optune ne convient pas à tout le monde. Pour obtenir plus de renseignements et déterminer si Optune vous convient, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur Optune.

Comment Optune peut-il s'intégrer à mon quotidien une fois prescrit?

Vous pouvez recevoir un traitement continu grâce à Optune presque partout où vous allez. Avec l'accord de votre médecin, vous pouvez utiliser Optune dans le cadre de vos activités quotidiennes, au travail, en déplacement et dans le cadre d'activités sociales.

« Je travaille encore à temps plein et je pratique toujours certains de mes passe-temps, comme la menuiserie. »

– Brian, utilisateur d'Optune



Susan est l'épouse et l'aidante naturelle de Brian.

* Témzolomide, aussi connu sous le nom de Temodal®.

Du soutien tout au long de votre parcours

Dès votre première question sur Optune et tout au long de votre traitement, nous proposons plusieurs ressources pour vous aider, y compris :



Les services de soutien nCompass offerts par Novocure.



Des renseignements pour commencer à utiliser Optune et poursuivre son utilisation.

Visitez [Optune.ca](https://www.optune.ca) pour plus de renseignements.

Les images des patients reflètent leur état de santé au moment où chaque photo a été prise.

novocure®

OPTUNE®

© Novocure GmbH, 2023. Tous droits réservés. Novocure et Optune sont des marques de commerce de Novocure GmbH. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. CAN-OPT-00101-F mai 2023 v1.0

Apprenez-en plus sur Optune

Un traitement portable pour le glioblastome multiforme



Kim est une utilisatrice d'Optune.

OPTUNE®

Apprenez-en plus sur Optune

Qu'est-ce qu'Optune?

Optune est un dispositif médical portable approuvé pour le traitement du glioblastome (GBM) chez les adultes de plus de 18 ans.

Comment Optune fonctionne-t-il?

Lorsqu'il est activé, Optune délivre au cerveau des champs électriques appelés champs de traitement de la tumeur (CTT) destinés à inhiber la division des cellules cancéreuses.

Les CTT peuvent ralentir ou arrêter la division des cellules tumorales du GBM et peuvent entraîner la mort de certaines cellules. À l'aide de quatre puces adhésives qu'on appelle collectivement « casque électromagnétique », la thérapie par CTT est administrée au cerveau, là où se trouve le cancer.



« Je ne pensais pas être encore en vie aujourd'hui. Et pourtant, je continue de profiter de la vie grâce à Optune. »

– Marcia, utilisatrice d'Optune

Juliet est leur fille.

BT est le mari et l'aidant naturel de Marcia.

Optune est approuvé pour traiter quel problème de santé?

Optune est un dispositif médical portable indiqué pour traiter un type de cancer du cerveau appelé glioblastome multiforme (GBM) chez les patients adultes âgés de 18 ans ou plus.

GBM nouvellement diagnostiqué

Si vous avez récemment reçu un diagnostic de GBM, Optune est utilisé avec et après la chimiothérapie d'entretien standard si :

- Votre cancer est confirmé par votre professionnel de la santé ET
- Vous avez subi une chirurgie pour enlever la plus grande partie possible de la tumeur et vous avez terminé une radiothérapie.

GBM récurrent

Si votre tumeur a réapparu, Optune peut être utilisé seul, en remplacement du traitement médical standard si :

- Vous avez essayé la chirurgie et la radiothérapie et ces thérapies n'ont pas fonctionné ou ne fonctionnent plus ET
- Vous avez essayé une chimiothérapie et votre GBM a été confirmé par votre professionnel de la santé.

Qui ne devrait pas utiliser Optune?

Optune pour le traitement du GBM n'est pas approprié pour tout le monde. Parlez à votre médecin si vous avez :

- Un dispositif médical implanté (shunt programmable), un défaut du crâne (tel qu'un os manquant sans remplacement) ou un fragment de balle. Optune n'a pas été testé chez les personnes avec des dispositifs électroniques implantés, ce qui peut empêcher les dispositifs de fonctionner correctement, et Optune n'a pas été testé chez les personnes présentant des défauts du crâne ou des fragments de balle, ce qui peut empêcher Optune de fonctionner correctement.
- Une sensibilité connue aux hydrogels conducteurs (le gel sur les casques placés sur le cuir chevelu comme ceux utilisés sur les ECG). Lorsque le casque Optune entre en contact avec la peau, il peut causer plus de rougeurs et des démangeaisons. Il peut, mais plus rarement, provoquer une réaction allergique potentiellement mortelle.

N'utilisez pas Optune comme traitement contre le GBM si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si Optune est sûr ou efficace pendant la grossesse.

Que dois-je savoir avant d'utiliser Optune?

Optune ne doit être utilisé qu'après avoir reçu une formation de la part d'un personnel qualifié, tel que votre médecin, une infirmière ou un autre membre du personnel médical qui a suivi une formation donnée par Novocure®, le fabricant d'Optune.

- N'utilisez pas de pièces qui ne sont pas fournies avec la trousse de traitement Optune fournie par Novocure ou par votre médecin.
- Ne mouillez pas le périphérique ou le casque électromagnétique.
- Veuillez noter qu'Optune est muni d'un cordon qui peut provoquer un déclenchement lorsqu'il est connecté à une prise électrique.
- Si vous avez une affection cutanée grave sous-jacente sur le cuir chevelu, voyez avec votre médecin si cela pourrait vous empêcher d'avoir recours au traitement avec Optune ou interférer avec celui-ci.

Quels sont les effets secondaires possibles d'Optune?

Les effets secondaires courants d'Optune lorsqu'il est utilisé en association avec une chimiothérapie pour le GBM sont l'irritation du cuir chevelu (rougeur et démangeaisons), une faible numération plaquettaire, des nausées, des vomissements, de la fatigue et des convulsions.

Les effets secondaires les plus courants lors de l'utilisation d'Optune seul pour le GBM sont l'irritation du cuir chevelu (rougeur et démangeaisons) et les maux de tête. Les autres effets secondaires sont des malaises, des contractions musculaires, des chutes et des ulcères cutanés.

Parlez à votre médecin si vous avez l'un de ces effets secondaires ou des questions.

Veillez consulter le manuel de l'utilisateur Optune pour des informations complètes sur les indications, les contre-indications, les avertissements et les précautions concernant l'appareil.

 **OPTUNE®**